




### 取り付け方法

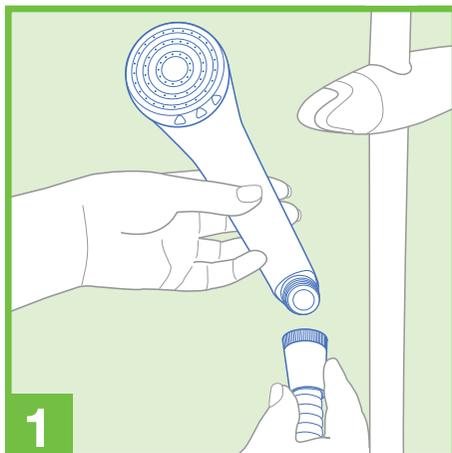


- ご使用のシャワーヘッドを取り外します

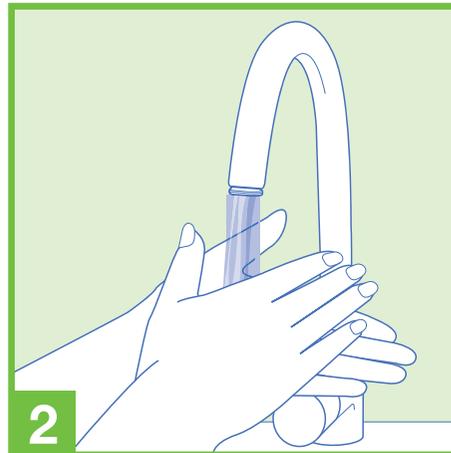

- 手洗いをします

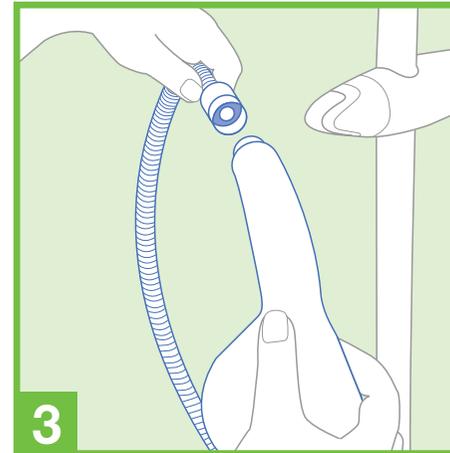

- 付属のガスケットをシャワーホースの出口に入れます
- QPoint™ シャワー ドッキングステーションをシャワーホースに接続します

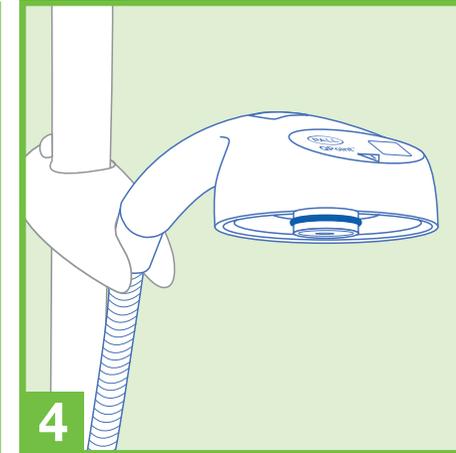

- フィルターカプセルを取り付ける準備としてドッキングステーションをシャワーホルダーに置きます

### はじめに

QPoint™ シャワーヘッド ドッキングステーションは滅菌されていません。  
 詳細なお取り扱い方法につきましては、製品に添付されている付属書をご参照下さい。

### 洗浄と消毒

- ドッキングステーションの汚れが目視できる、あるいは汚れてきていると思われるとき、クロムめっきに適応性のある一般的な洗浄液を用いて洗浄することができます。
- 掃除の一環として日常的にドッキングステーションの外表面に洗浄剤を用いても操作に影響はありません。ご使用中や洗浄している際にはドッキングステーションからフィルターカプセルを取り外さないでください。
- 日常的な給水システムの消毒の間は吐出口から流します。フィルターカプセルをドッキングステーションに接続したままでご使用いただけます。

### ご使用の際に

- フィルターカプセルが汚染されないように、シャワーヘッドをホルダーに置いた状態でご使用下さい。

### 取り外し方法

- シャワーホースとの接続を外して、取り除いてください。

### 廃棄方法

- ドッキングステーションを廃棄する場合には、お住まいの地域における手順に従ってください。材質につきましては本品のカタログをご覧ください。


QPoint™ 製品に関してご不明な点などございましたら、弊社または販売店の担当者にお問い合わせ下さい。




### 取り付け方法




- 1
- QPointドッキングステーションが清潔で乾燥している事を確認してください
  - Oリングが適切な位置にあり、破損等が無い事を確認してください

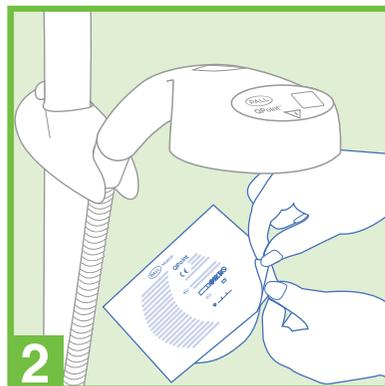


- 2
- 個包装パッケージは取り付け時の汚染から保護するために用いる事ができます
  - フィルターカプセルをしっかり持ちながらフタを取り除いて開封します

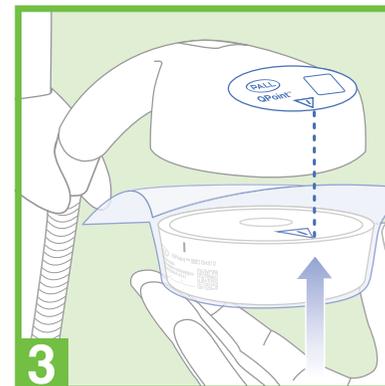


- 3
- フィルターカプセルの三角印とドッキングステーションの正面パネルにある三角印を合わせます

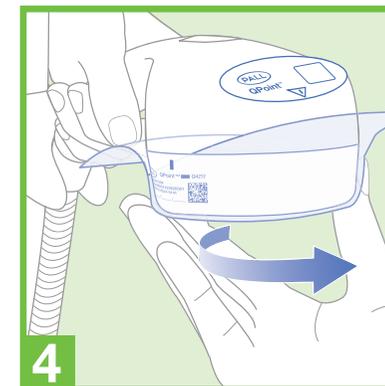


- 4
- 三角印を合わせたら、フィルターカプセルを持ち上げて、ドッキングステーションと接続し、1/4ほど右方向に回転させます

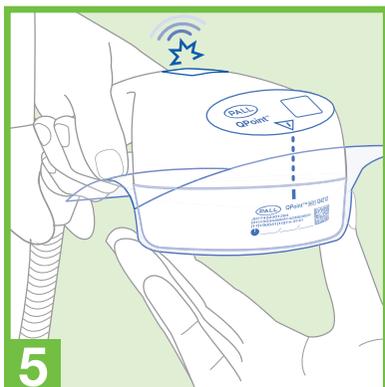

- 5
- フィルターカプセルのマークとドッキングステーションの三角印が重なるとロックピンがフィルターカプセルと働合します

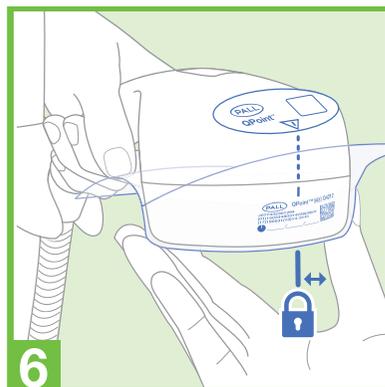

- 6
- フィルターカプセルがドッキングステーションと接続されているかを検証するために、フィルターカプセルを左に回転させようとしても動かないことを確認してください

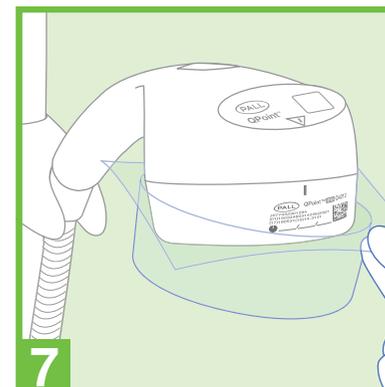

- 7
- ご使用前に保護パッケージを取り除いて下さい
  - フィルターカプセルは62日間(2ヶ月)までご使用いただけます

### 取り外し



- 8
- リリースボタンを上げて、フィルターカプセルを左に回して取り外してください
  - ご使用後のフィルターカプセルはお住まいの地域の手順に従って廃棄してください

